


Ecouvillonnage naso-pharyngé à partir de l'écouvillon sec fourni avec le kit

*Port de masque, de gants, de sur-blouse et de lunettes de protection*

Tutoriel [cliquez ici](#)

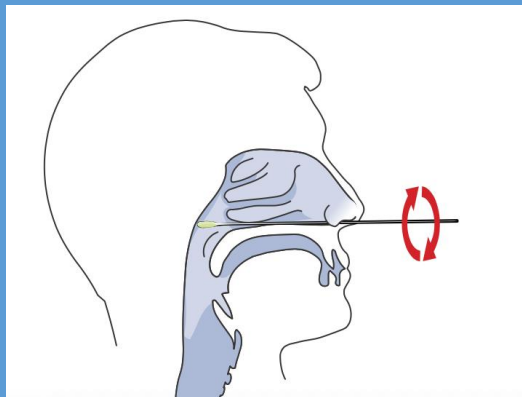

Transfert de l'écouvillon dans le tube (casser la tige de l'écouvillon dans le tube)

Refermer soigneusement le tube et le désinfecter avant de l'identifier (nom, prénom, date de naissance)



Transfert du tube dans le sachet de transport et fermeture hermétique avec la bande autocollante

Glisser l'ordonnance et la fiche de renseignements cliniques dans la double poche



Acheminement au laboratoire dans les meilleurs délais